

ALGODYSTROPHIES

Intérêt du traitement

Stimulation et saturation des récepteurs sensitifs cutanés et profonds. Soulagement de la douleur et réveil de l'image motrice pour permettre la réutilisation de la main ou du pied.

Quand / fréquence ?

1 à 2 fois par jour.

En complément de la séance de rééducation ou en soin isolé les jours sans séance

Comment ?

Installer le patient sur une chaise à bonne hauteur.

Faire immerger la main et le poignet ou le pied et la cheville au sein du mélange.

Attention : le confort du patient est essentiel.

Quelle température ?

Une eau tiède comprise entre 34 et 37° C

Si douleurs vives, passer à l'eau froide (température eau du robinet).

Une température plus froide pour le pied et la cheville

Quelle vitesse de rotation ?

Vitesse minimum : 6 à 7 tours/minute lors de la prise de contact avec Aquaroll® puis augmentation progressive au fil des séances jusqu'à 12 tours/minute, sauf demande explicite du patient. Quelques variations pour les phénomènes d'accoutumance (ou « d'habitude ? »).

Quels exercices associés ?

Pour la main et le poignet, faire effectuer au patient des mouvements au sein du mélange eau + billes

- ✿ Enroulement des doigts,
- ✿ Présentation du pouce vers les pulpes des autres doigts,
- ✿ Flexion-extension de poignet,
- ✿ Circumduction du poignet,
- ✿ Ouverture de main et extension de poignet, fermeture de main et flexion de poignet
- ✿ Recherche d'une bille plus grosse au sein du mélange

Pour le pied et la cheville, faire effectuer au patient des mouvements au sein du mélange eau + billes.

Durée de la séance ?

Pour la main 10 à 12 min.

Pour le pied 15 à 20 min.

La cuve contenant les billes peut, au choix tourner dans le sens horaire ou antihoraire ou de manière alternée, dans un sens puis dans l'autre. Dans ce cas, la durée dans un sens peut être paramétrée depuis le tableau de bord.

Exemple : pour une séance de 12 minutes, on peut programmer des cycles de 2, 3, 6 ou 12 minutes en débutant dans le sens souhaité.

Attention : la première séance peut être plus courte pour familiariser le patient avec ce traitement.

Durée du traitement ?

Jusqu'à stabilisation de la douleur et récupération durable de la motricité.

AQUAROLL-INTERNATIONAL SAS

145 rue de la Montat – 5-9 Allée du Pont de l'Ane – 42100 Saint-Etienne

Tel +33 638 246 402

www.aquaroll-international.com

contact@aquaroll-international.com